

Mode d'emploi

NOM DE L'OUTIL : ETHYLOMÈTRE

L'éthylotest AlcoTrue® P est un appareil professionnel qui permet de déterminer de façon précise la concentration d'alcool présente dans le sang.

1^{er} étape

Insérez un nouvel embout en plastique sur l'appareil en prenant soin de ne pas toucher l'embout avec vos doigts. Utilisez l'emballage plastique comme protection lorsque vous insérez l'embout dans l'appareil.



NB : les embouts sont à usage unique, assurez-vous que le plastique de protection n'a pas été ouvert avant.

2^{ème} étape

Une fois l'embout à usage unique inséré, allumez l'appareil en pressant quelques secondes le bouton central « OK », un bip sonore retentira. Patientez ensuite jusqu'à ce qu'il soit indiqué « READY » sur l'écran.



3^{ème} étape

Invitez ensuite la personne à souffler dans l'embout prévu à cet effet. L'utilisateur de l'appareil doit veiller à maintenir un souffle continu. Un bip sonore retentira durant quelques secondes et le mot « TEST » apparaîtra sur l'écran. Durant ce laps de temps, la personne doit continuer à souffler. Lorsque le bip cessera, la personne pourra arrêter de souffler dans l'embout. Le mot « ANALYZING » apparaîtra ensuite sur l'écran suivit des résultats du test.

NB : si la personne ne souffle pas correctement, « BLOW FAILURE » apparaîtra sur l'écran. Si le cas se présente, c'est que le test a échoué. Invitez donc la personne à renouveler l'opération en lui indiquant de souffler doucement et de manière continue, et ce pendant toute la durée du bip sonore.



Il est impératif que la personne qui souffle dans l'appareil n'ait pas consommé d'alcool dans les 15 minutes précédant le test (dans le cas contraire il y a un risque d'endommager les capteurs de l'appareil). **L'idéal est d'attendre 30 minutes entre la dernière consommation d'alcool et le test** afin d'obtenir les résultats les plus proches de la réalité. Notez aussi que le test ne peut pas être effectué sur une personne ayant fumé dans les 5 à 10 minutes précédant le test.

4^{ème} étape

Les résultats du test indiquent le taux d'alcool présent dans le sang et est quantifié en promille (CAS). Pour rappel, la limite légale autorisée au volant est de 0,5 g/L.

Code couleur des résultats

Vert = PASS – indique que la personne est très en-dessous du taux d'alcool limite acceptable pour reprendre le volant ou qu'elle n'a pas consommé d'alcool.

Jaune = ALERT – indique que la personne est proche du taux limite acceptable pour reprendre le volant qui est de 0.5 g/L.

Rouge = FAIL – indique que la personne a dépassé le taux d'alcool autorisé pour reprendre le volant.

5^{ème} étape

Pour éteindre l'appareil, pressez le bouton de démarrage jusqu'à ce que le décompte des secondes soit effectué.

